



# Dengue NS1 Antigen Test

“Humasis Dengue NS1 Antigen Test mampu mendeteksi virus sejak hari pertama munculnya gejala”

## KEUNTUNGAN

### Mendiagnosis Antigen NS1 Dengue bahkan selama masa jendela


- Deteksi infeksi sebelum terjadi serokonversi
- Antigen NS1 dapat terdeteksi dalam serum sejak Hari 1 munculnya demam
- Antibodi IgM/IgG belum dapat terdeteksi hingga Hari 3-4

### Mudah digunakan: Hasil Cepat & Kondisi Penyimpanan

- Jauh lebih cepat daripada uji ELISA : hanya 15~20 menit
- Dapat menggunakan Darah utuh, Plasma, dan Serum
- Kondisi penyimpanan pada suhu ruang dan kadaluarsa sampai 24 bulan

### Akurasi Tinggi

- Kesesuaian 98,6% dibandingkan dengan kultur virus dan RT-PCR

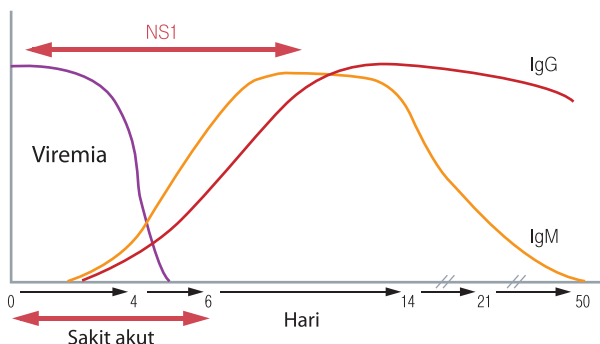


Gambar 1. Respon imun tubuh terhadap infeksi virus Dengue.  
(Disadur dari Nature Rev Micro. 2010; 8:s7-s16)






## CARA PENGUJIAN

### Prosedur pengujian

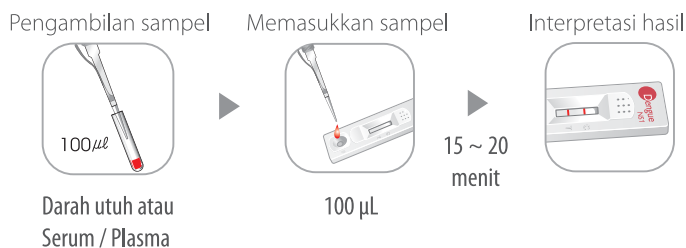

### Interpretasi Hasil

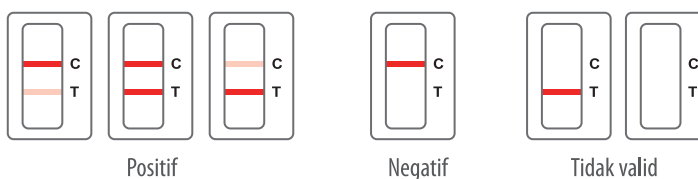

## Karakteristik Kinerja

		Kultur Virus/RT-PCR		Total
		Positif	Negatif	
Humasis Dengue NS1 Ag Test	Positif	93	2	95
	Negatif	2	198	200
Total		95	200	295

## Spesifikasi

Nama Produk	Humasis Dengue NS1 Ag Test
No. Katalog	ADEG-7025
Kemasan	25 tes/box
Spesimen	100 µL Darah utuh/Plasma/Serum
Lama pemeriksaan	15 ~ 20 menit
Penyimpanan	1 ~ 30°C (34 ~ 86°F)
Kadaluarsa	24 bulan

## Informasi Pemesanan



PT MEDISINDO BAHANA  
Rukan Graha Cempaka Mas E 15  
Jl. Letjend Suprpto No.1, Jakarta Pusat  
Telp: (021) 425 0665 | Fax: (021) 425 0703  
Email: medisindo@medisindo.co.id | website: www.medisindo.co.id

Distributor :